

# WIDEX ZEN SOUNDRELAX™

## GUIDE POUR LES CAS PARTICULIERS

Vous avez des patients acouphéniques ayant des besoins spécifiques ? Vous souhaitez savoir comment effectuer une adaptation sur mesure des aides auditives Widex et leur programme Zen SoundRelax ?

Widex à vos côtés pour offrir la réponse la plus adaptée aux personnes souffrant d'acouphènes, sans perte auditive, celles qui ont besoin d'un programme pour la nuit ou tout simplement pour se détendre. Suivez le guide !


Pour plus d'informations sur la réalisation d'un appareillage de base pour les aides auditives Widex Zen | SoundRelax, veuillez consulter notre GUIDE ÉTAPE PAR ÉTAPE POUR UN APPAREIL WIDEX ZEN | SOUNDRELAX.

## POUR VOS PATIENTS SANS PERTE AUDITIVE

**Votre patient souffre d'acouphènes mais n'a pas besoin d'amplification ? Proposez un appareillage auditif ouvert :**


**1** Cliquez sur l'onglet **PROGRAMMATION** dans Compass GPS puis sur **SENSOGRAMME** dans la barre latérale à gauche.

**2** Entrez des valeurs entre 10 et 15 dB pour une « perte auditive » plate dans les blocs **SENSOGRAMME** encadrés.

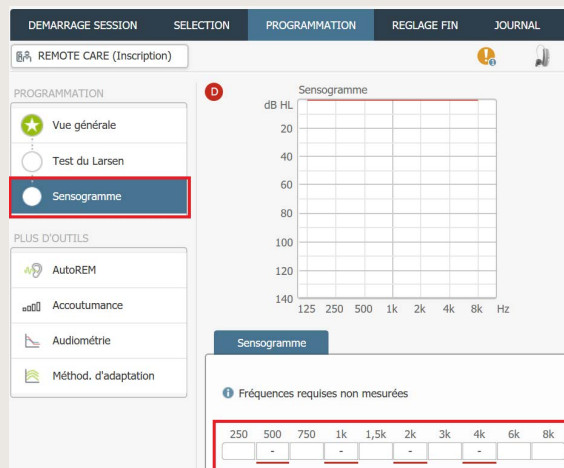


**3** Pour créer un programme Zen/Relax : rendez-vous sur **RÉGLAGES FINS > GESTIONNAIRE DES PROGRAMMES** puis sélectionnez **ZEN+/RELAX+** sous SmartToggle. Pour des instructions plus détaillées sur la création d'un programme, reportez-vous au guide étape par étape susmentionné.

**4** Après avoir sélectionné les styles "Zen ou Relax" souhaités, cliquez sur l'icône **RÉGLAGES** (petite roue crantée) à côté du style concerné. Une fenêtre **PARAMÈTRES DE STYLE** s'ouvrira pour vous permettre de régler le rythme, le volume ou la hauteur.

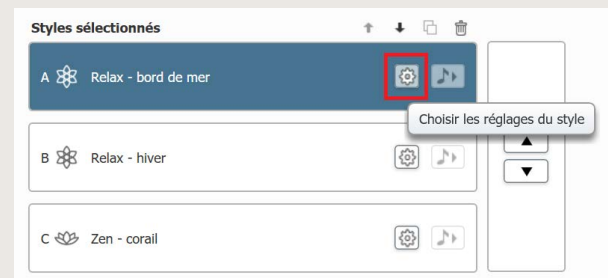

**5** Dans la fenêtre **RÉGLAGE DU STYLE**, décochez la case intitulée **MICROPHONE**, de cette manière, le microphone de l'aide auditive sera éteint lors de l'utilisation du programme

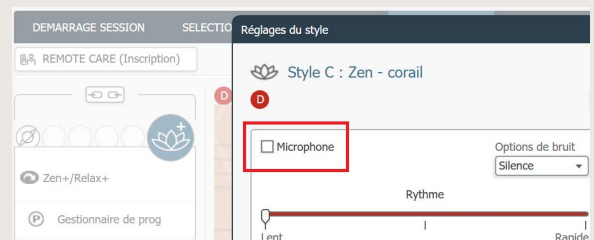

**6** Enregistrez vos sessions d'adaptation dans Compass GPS comme d'habitude.

## POUR VOS PATIENTS EN DEMANDE D'UN PROGRAMME NUIT OU RELAXATION

S'il n'est généralement pas recommandé de dormir en portant ses aides auditives, cela ne s'applique pas forcément à certaines personnes souffrant d'acouphènes qui peuvent ainsi se coucher sans en ressentir les désagréments. Notez que le processus présenté peut être suivi pas à pas pour vos clients souhaitant utiliser un programme de relaxation, par exemple pendant la méditation.

1

Pour créer un programme Zen/Relax : rendez-vous sur **RÉGLAGES FINS > GESTIONNAIRE DES PROGRAMMES** puis sélectionnez **ZEN+/RELAX+** sous SmartToggle. Pour des instructions plus détaillées sur la création d'un programme, reportez-vous au guide étape par étape susmentionné.


2

Sélectionnez le style Zen/Relax souhaité et ajoutez-le à l'**EMPLACEMENT C**. Ensuite, cliquez sur l'icône **RÉGLAGES** à côté du style dans l'Emplacement C.




3

Dans la fenêtre **PARAMÈTRES DE STYLE**, désactivez le microphone de l'aide auditive en cochant la case à côté de **MICROPHONE**.

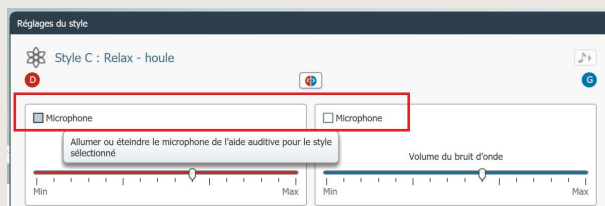

4

Accédez à l'onglet **OPTIONS**, après avoir fermé la fenêtre **PARAMÈTRES DE STYLE**. Sous **TEMPS DE LECTURE LIMITÉ**, cliquez sur la case à cocher pour l'**EMPLACEMENT C** et optez pour la durée de temps de jeu souhaitée dans le menu déroulant.

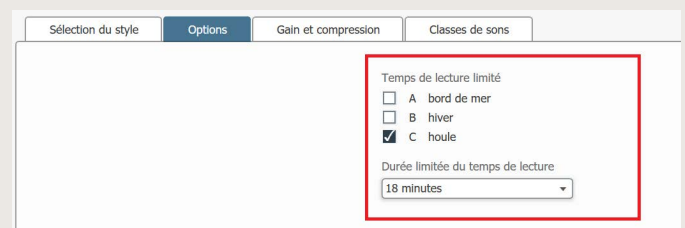

5

Enregistrez vos sessions d'adaptation dans Compass GPS comme d'habitude.