


GUIDE PAS À PAS POUR UNE PROGRAMMATION WIDEX ZEN/SOUNDRELAX

Ce document vous guidera pour mener à bien l'adaptation d'une aide auditive avec Widex Zen/SoundRelax, sous Compass™ GPS. Si Widex Zen a été spécifiquement développé pour les patients acouphéniques, Widex SoundRelax peut s'adresser à des patients présentant ou non des acouphènes. C'est une solution pour se détendre, se relaxer et se concentrer.

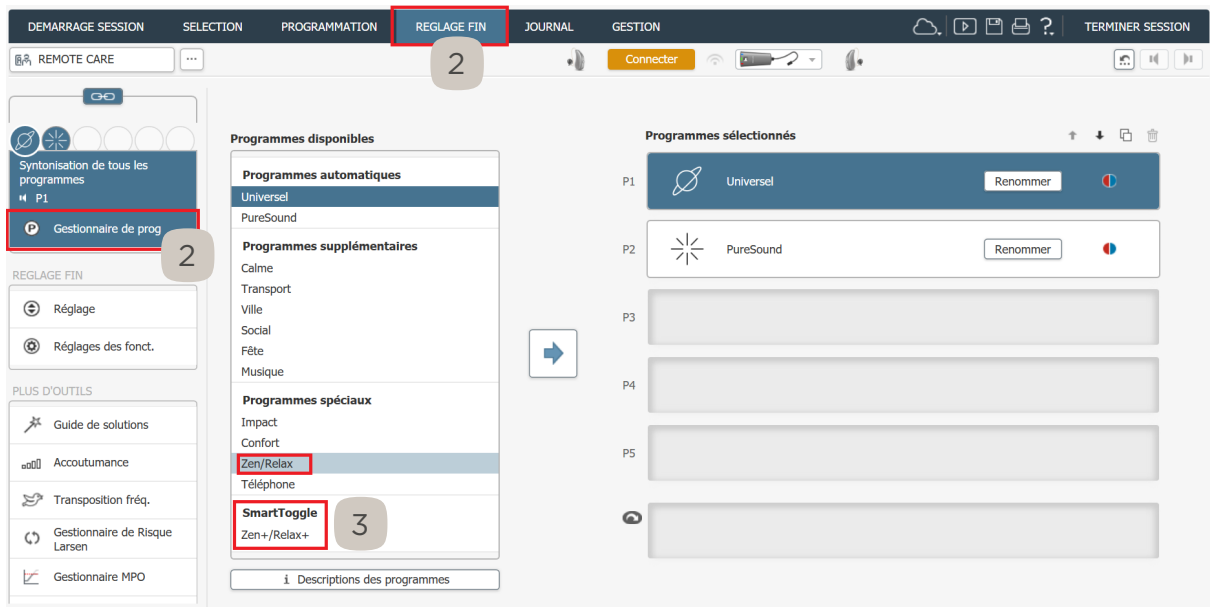

1

Nous vous recommandons de suivre les étapes de base de la première adaptation, y compris le SENSOGRAMME et le TEST DE LARSEN. Cela garantira que les réglages des appareils auditifs sont d'abord tous programmés selon la perte auditive du patient, en tenant compte du couplage acoustique propre et de son effet réel dans le conduit auditif externe.

2

Cliquez sur l'onglet RÉGLAGE FIN et sélectionnez GESTIONNAIRE DE PROGRAMME.

3

Sous la catégorie SmartToggle dans Programmes disponibles, sélectionnez ZEN+/RELAX+. Cliquez sur la flèche pour la déplacer à la section Programmes sélectionnés. Vous pouvez double-cliquer sur le nom du programme pour l'ajouter.


CONSEIL : Si vous voulez que votre patient puisse accéder à un programme Zen/Relax sans application ou RC-DEX, sélectionnez Zen/Relax sous la section Programmes spéciaux. Cependant, maximum deux programmes peuvent être sélectionnés dans la grille de programmes classique et le bouton-poussoir de l'appareil auditif est utilisé pour changer de programme. Un total de 5 harmonies Zen peut être proposé via les programmes Zen et Zen+.

4

Un programme Zen/Relax peut se reposer sur la base d'un programme universel ou un autre déjà réglé lors de la première adaptation. Vous pouvez modifier cette base de programme en cliquant sur l'icône de réglage SETTINGS à côté du programme Zen+/Relax+ sélectionné.



GUIDE PAS À PAS POUR UNE PROGRAMMATION WIDEX ZEN/SOUNDRELAX

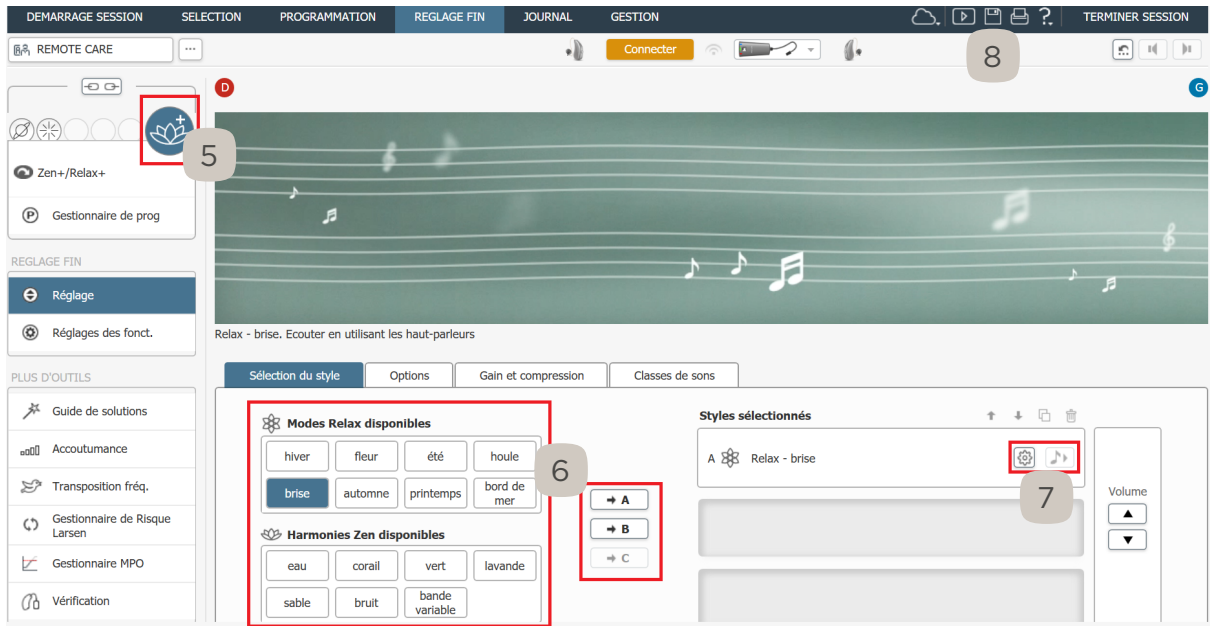

5


Pour accéder aux programmes Zen+/Relax+, double-cliquez sur l'icône Zen LOTUS qui apparaît maintenant dans la barre des programmes.


6

Vous pouvez sélectionner jusqu'à trois styles Zen / Relax différents en cliquant sur l'un des styles, puis l'un des boutons fléchés pour Fente A, B ou C.

CONSEIL : Pour faire une démonstration à votre client des styles disponibles, vous pouvez les diffuser à travers vos haut-parleurs ou directement à travers l'appareil auditif après avoir sélectionné le style.

7

Pour ajuster les paramètres individuels de chaque style sélectionné, cliquez sur . Vous pouvez ajuster le rythme, la hauteur et le volume de chaque style, ainsi qu'ajouter un bruit blanc ou d'onde à l'harmonie Zen ou au mode Relax.

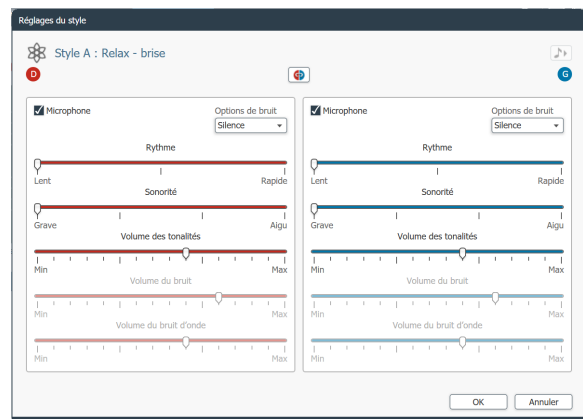

EN RAPPEL : Vérifiez que les tons Zen/Relax sont audibles, et de façon de façon douce, sans qu'ils puissent perturber l'intelligibilité ; et que le volume des tonalités est ajusté pour diminuer la perception des acouphènes.

8

Enregistrez vos programmes Zen/Relax en sauvegardant votre session dans Compass GPS comme d'habitude.

Astuce : obtenez une explication de toute fonctionnalité dont vous n'êtes pas certain en plaçant sur elle le pointeur de votre souris. Un encart informatif s'ouvrira automatiquement.